


ergoflix

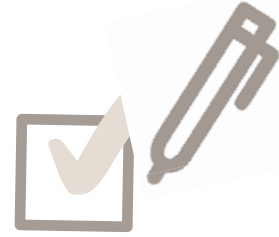

Checkliste

E-Rollstuhl fit für den Betrieb im Winter machen

- Lade die Akkus bei konstanter Raumtemperatur von ca. 20 °C.
- Lade die Akkus voll auf, wenn du den E-Rollstuhl nutzen möchtest.
- Setze die Akkus erst kurz vor Fahrtantritt in den E-Rollstuhl ein.
- Lagere die Akkus im Winter nicht an kalten Orten wie dem Auto oder der Garage.
- Prüfe den Akkustand Ihres E-Rollstuhls regelmäßig.
- Prüfe die Beleuchtung Ihres E-Rollstuhls regelmäßig.
- Meide abschüssiges Gelände bei Schnee und Glätte.
- Trage bei Dunkelheit helle Kleidung (optional mit Reflektoren).



Übrigens: Eine hohe Zuladung und extreme Kälte haben eine geringere Reichweite zur Folge. Plane dies bei Deiner Fahrt mit dem E-Rollstuhl ein.

Wir wünschen Dir eine angenehme Fahrt!



Ihre Notizen: